

# RelyX™ Unicem 2 Automix

## 3M ESPE











3M France - Marchés de la Santé  
Département Dentaire - 3M ESPE  
Boulevard de l'Oise 95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tel.: 01 30 31 82 32 - www.3MESPE.fr

Centre Information Clients  
N° Azur 0 810 331 300  
www.3m.com/fr

## Ciment de scellement composite auto-adhésif universel en seringue auto-mélangeuse

**Indications :** Inlays/onlays, couronnes, bridges en céramique, métal ou composite

Tenons et vis, bridges sur inlays/onlays jusqu'à 3 éléments, bridges Maryland jusqu'à 3 éléments, prothèses tout céramique composite métal sur piliers implantaires

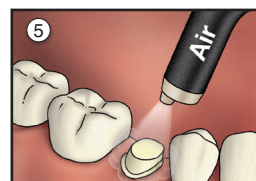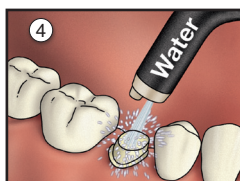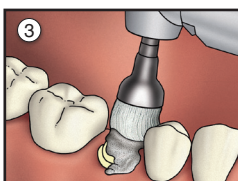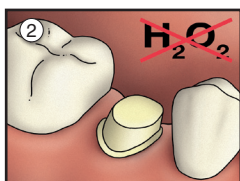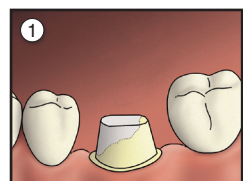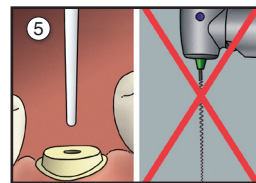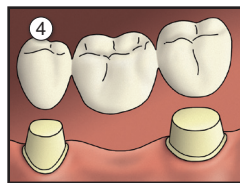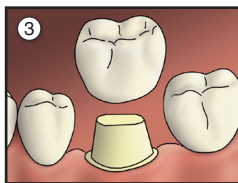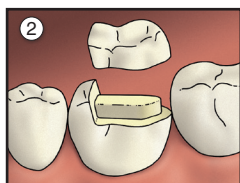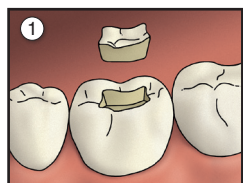



Dépose de la prothèse provisoire

Ne pas appliquer de produit sur la préparation

Nettoyage de la préparation avec un mélange pierre ponce et eau

Rinçage à l'eau

Séchage léger à l'air

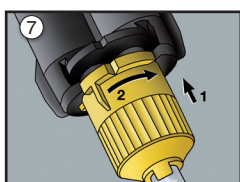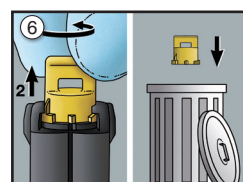



La 1<sup>re</sup> fois jeter le bouchon obturateur

Montage de l'embout mélangeur

- Excellente adhésion
- Longue pérennité
- Simple à utiliser
- Consistance optimale
- Dosage aisé
- Choix des embouts
- Seringage en bouche
- Sans bulle
- Chémo ou photopolymérisable
- Peu de sensibilités post-opératoires
- Excellentes propriétés mécaniques




1 seringue 5 ml de 8,5g.  
3 teintes/opacités :  
Translucide, A2 universel, A3 opaque

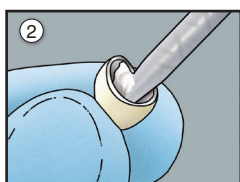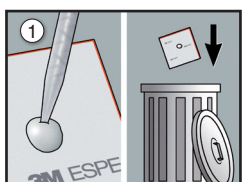


Purge d'un petit pois de matériau


Seringage direct dans l'intradados prothétique traité

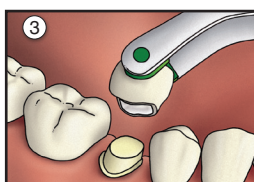


Mise en place de la prothèse (ne coule pas)

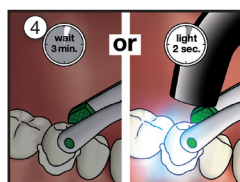


Légère chémo ou potopoly-  
mérisation flash

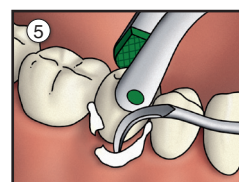


Nettoyage des excès

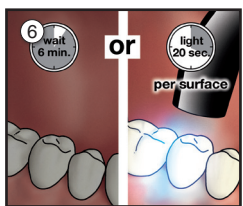


Chémopolymérisation ou photopolymérisation 40 secondes par face

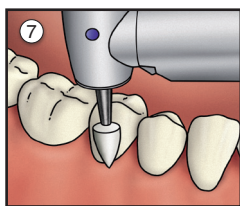


Finition

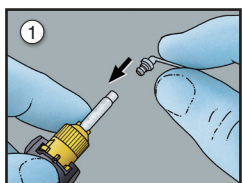


Pose de l'embout intra-canaire sur l'embout mélangeur large

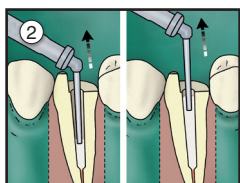


Seringage intra-canaire sans bulle

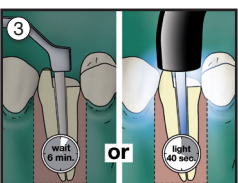


Chémo ou photopolymérisation

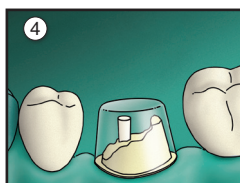


Pose d'une matrice de coffrage pour la reconstitution corono-radicaire

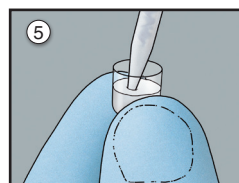


Remplissage avec un composite de la matrice

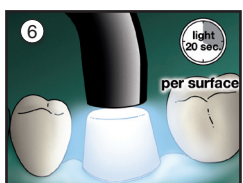

Mise en place sur la dent traitée par un adhésif pour composite photopolymérisable

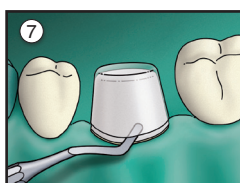

Dépose de la matrice

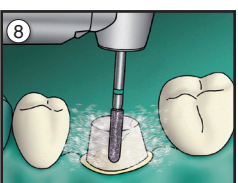

Finition de la préparation