

P-One

Distributeur à boulettes de coton

Dispositif innovant avec système d'expulsion automatique



P-One

Distributeur à boulettes de coton

Design innovant et fonctionnalité simple

Système d'expulsion automatique par gravité

Matériaux à haute résistance chimique

Facile à utiliser et à désinfecter

Développé et fabriqué à 100% en Suisse



Swiss quality
dental products

P-One

Distributeur à boulettes de coton

Propriétés techniques

Plastique POM

Bague de pression en inox

Couvercle de fermeture à 2 positions

2 grilles disponibles:

- grande grille pour boulettes N° 1 et 2


- petite grille pour boulettes N° 3 à 5

Méthode de recharge en vrac

Capacité de 15 ml de coton (3 g)



GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

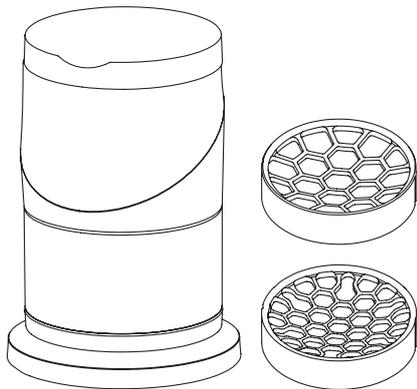





P-One Distributeur à boulettes de coton REF 33280

1 distributeur

1 grande grille pour boulettes N° 1 et 2

1 petite grille pour boulettes N° 3, 4 et 5

1. Séparer le pied du tube-collecteur et le tourner à l'envers
2. Choisir la grille appropriée et la glisser au fond du tube-collecteur.
3. Insérer les boulettes dans le tube-collecteur jusqu'à la marque limite
4. Insérer le pied dans le tube-collecteur
5. Retourner le dispositif complet à l'endroit, P-One est prêt à l'emploi!

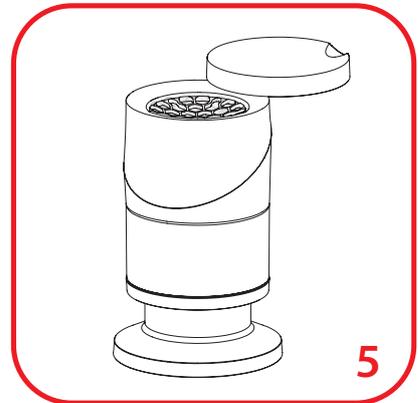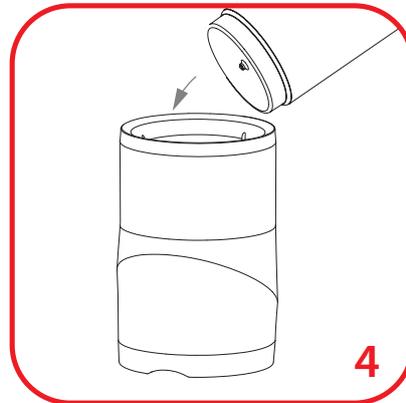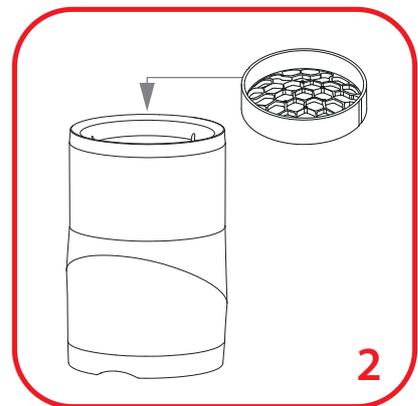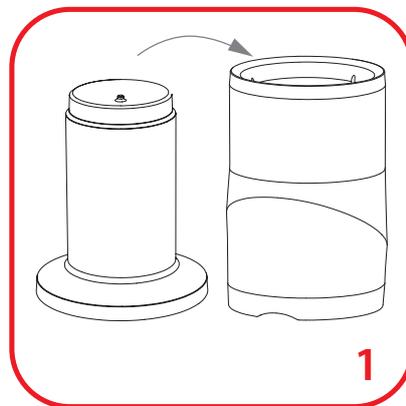

Produits Dentaires SA
Vevey . Switzerland

www.pdsa.ch
© PD 150601