

Unident[®] Impre



Désinfection et nettoyage des empreintes dentaires.



Concentré liquide spécialement conçu pour la désinfection et le nettoyage des empreintes dentaires, des porte-
empreintes, des appareils dentaires, des prothèses, etc.

Caractéristiques principales

- Dilution : 10%
- Temps de contact : 15 minutes
- Convient pour les empreintes en alginate, silicone, polyéther gommé, polysulphure et hydrocolloïdes
- Utilisation sûre – la stabilité dimensionnelle des empreintes est respectée
- Compatible avec une grande variété de matériaux
- Très large spectre d'activité
- Marqué CE conformément à la Directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Genève | Suisse
Tél + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Unident® Impre

Protocole d'utilisation

Avant utilisation

Porter des gants appropriés.



Diluer Unident® Impre dans un bac de trempage à 10% (100ml par 1L d'eau).



Immerger les empreintes dans la solution pendant 15 minutes.



Retirer les empreintes de la solution et les rincer soigneusement à l'eau courante.



Les sécher immédiatement à l'aide d'un essuie-tout jetable.


Précautions d'emploi

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).

Stockage entre +5°C et +35°C.

Dispositif médical de classe IIb, CE0459 (Directive 93/42/CEE modifiée).

Spectre d'activité

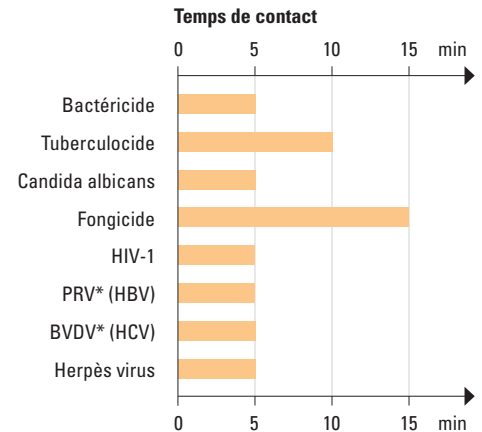

* PRV : Virus modèle de l'Hépatite B

* BVDV : Virus modèle de l'Hépatite C

Conforme aux normes européennes

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561

Tuberculocide : EN 14348 (60 mins), prEN 14563

Levuricide : EN 1275, EN 13624

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562

Composition

100g d'Unident® Impre contiennent 2.75g de chlorure de N-alkyl-N-benzyl-N, N-diméthylammonium, 5g de glutaraldéhyde.

Données physiques

Couleur : Transparent

pH : 2.5 (concentré)

Conservation : Concentré 3 ans

Dilué 7 jours maximum*

Emballage : PEHD recyclable

*Selon le degré de salissure.

Conditionnement

1kg	1L	2,5L	5L
	✓		

Accessoires

Bac de trempage 3L (INTANK)



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS